

## Dressbuddy handleiding

### Waarom dit hulpmiddel?

De DressBuddy is de ideale kousenhulp indien u niet makkelijk of helemaal niet bij uw voeten kunt komen om uw steunkousen aan- of uit te trekken. Dit is het juiste hulpmiddel om zelfstandig uw kousen aan- en uit te trekken. Bovendien blijven uw kousen langer mooi omdat u ze gecontroleerd aantrekt.

### Uitleg

**Stap 1:** u slaat de band van de steunkousen ca. 10 cm om en zet de gele balletjes op de kous.

**Stap 2:** doe de easyslide om uw voeten heen om op die manier makkelijker in de steunkous te glijden.

**Stap 3:** vervolgens slaat u de kous weer terug en duwt u de Dressbuddy naar beneden (u duwt dus van u af). U strekt de voet om over de enkel te komen en haalt uw voet uit de steunkous.

**Stap 4:** trek tot slot de easyslide onder de kous vandaan.



Pak het groene gedeelte en trek de Slip Perfect onder de kous vandaan.



Schuif uw hak met een beweging van achter naar voor totdat de kous goed zit bij de hiel.



Bij het uittrekken van de kous, trek alléén aan de kous zodat hij makkelijk uitglijdt over de slip heen.

[www.eritekbv.nl](http://www.eritekbv.nl)

ERITEK BV  
INTERNATIONAL